

دفترچه راهنمای

صندلی ماساژور

RT-8901



با تشکر از انتخاب شما، پیش از استفاده از صندلی، لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید. توجه ویژه به نکات ایمنی ذکر شده در دفترچه، به عملکرد بهتر و استفاده ایمن تر از محصول کمک شایانی خواهد کرد.

از شما بابت خرید این محصول تشکر می‌کنم. لطفاً قبل از استفاده از این دستگاه دفترچه راهنما را مطالعه کنید تا از عملکرد مناسب اطمینان حاصل نمایید.



محتویات دفترچه راهنما:

- ملاحظات ایمنی
- نام و عملکرد هر یک از اجزاء
- ساختار بیرونی
- ساختار درونی
- جعبه برق
- دکمه های دسته صندلی
- دستورالعمل های دکمه های دسته صندلی
- عملکرد و امکانات
- بررسی های مقدماتی
- موقعیت و محل نصب
- حفاظت کف
- محیط اطراف
- اتصال به زمین
- روش های نصب
- حرکت دادن صندلی ماساژ
- راه اندازی
- قبل از نشستن روی صندلی
- بعد از استفاده
- مراقبت و نگهداری
- عیب یابی
- مشخصات فنی

دستور العمل های امنیتی مهم:

خطر - برای کاهش شوک الکتریکی

۱. همیشه بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن سیم برق دستگاه را از پریز برق جدا کنید
هشدار: برای کاهش ریسک سوختگی، آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب افراد:
۱. دستگاه بدون حضور افراد نباید به برق باشد. زمانیکه استفاده نمی کنید برق را جدا کنید
۲. زیر پتو یا منکا استفاده نکنید گرمای بیش از حد باعث آتش سوزی، شوک الکتریکی و آسیب فرد می شود
۳. زمانیکه دستگاه توسط بچه ها یا افراد معلول استفاده می شود نظارت دقیق لازم است
۴. از دستگاه فقط مقاصد توضیح داده شده در دفترچه راهنما استفاده شود
۵. زمانیکه سیم دستگاه آسیب دیده از دستگاه استفاده نکنید و اگر به درستی کار نمی کند یا صدمه دیده و یا داخل آب افتاده باشد دستگاه را به مرکز خدمات برای تعمیر برگردانید
۶. دستگاه را توسط سیم حمل نکنید یا از سیم به عنوان دسته استفاده نکنید
۷. سیم را از سطوح گرم دور نگه دارید



دستور العمل های امنیتی مهم:

۸. زمانیکه محفظه های هوا بسته شده از دستگاه استفاده نکنید محفظه ها را دور از پرز و مو نگه دارید
۹. هیچ اشیایی را داخل محفظه فرو نکنید
۱۰. بیرون از منزل استفاده نکنید
۱۱. در مکانهایی که اسپری استفاده شده یا اکسیژن کم است استفاده نشود
۱۲. برای قطع شدن اتصال، تمام موقعیت ها را روی دستگاه کنترل خاموش کنید وسیم را از پریز بیرون بکشید
۱۳. نزدیک لباسهای گشاد و جواهرات از دستگاه استفاده نکنید.
۱۴. در هنگام استفاده موهای بلند را جمع کنید.
۱۵. سطوح گرم را به دقت استفاده کنید ممکنه باعث سوختگی شود بر روی پوستهای حساس استفاده نشود (استفاده سطوح گرم) توسط بچه ها و افراد معلول خطرناک می باشد.



بهترین روشها برای استفاده ایمن:

- فقط برای کاربران زیر 120 کیلوگرم استفاده شود
- احتیاط: از این محصول فقط برای اهداف درمانی استفاده نکنید
- از این محصول فقط برای مصارف مورد نظر مقید شده در دفترچه راهنما استفاده کنید
- دستگاه فقط باید توسط یک نفر استفاده شود برای جلوگیری از صدمه و آسیب دیدگی محصول توسط دو یا چند نفر بطور همزمان استفاده نشود
- بلافاصله بعد از خوردن غذا استفاده نشود چون باعث ناراحتی می شود
- لوازم جانبی و زیور آلات را از دست و بازو جدا کنید، جیبها را خالی کنید
- لوازم داخلی زیر کوسن و با شما را بررسی کنید در صورت وجود خرابی استفاده نکنید و برای تعمیر به متخصص حرفه ای خدمات مراجعه کنید
- اگر در زمان کار با محصول احساس ناراحتی غیر طبیعی داشتید محصول را خاموش کرده و از آن استفاده نکنید
- استفاده از این محصول هر بار به مدت 20 دقیقه سفارش شده است
- اطمینان حاصل کنید مانعی در پشت صندلی نباشد و فضای کافی وجود داشته باشد قبل از آنکه نواحی پشتی و ساق پارا تنظیم کنید
- اطمینان حاصل کنید فشار بیش از حد روی قسمت پشتی و ساق پا وجود نداشته باشد
- اطمینان حاصل کنید بچه، حیوان خانگی و یا سایر اشیا در قسمت پشتی صندلی و ساق پا وجود نداشتند
- برای جلوگیری از آسیب و صدمه زمانی که از دستگاه استفاده می کنید لطفا بدرستی بنشینید
- برای جلوگیری از آسیب صندلی آن را فشار با هل ندهید توسط چرخ کوچک زیر صندلی آن را روی کف چوبی یا فرش بچرخانید



ممنوعه

- اگر این محصول آسیب دید یا در معرض نشت برق قرار گرفت یا قطعات آن جدا شد، از آن استفاده نکنید.
- اشیا سنگین را به روی قسمت پایی قرار ندهید.
- بچه ها باید تحت نظر باشند تا با صندلی ماساژ بازی نکنند.
- زمانیکه صندلی در حال کار کردن است به خواب نروید.
- زمانیکه تحت تأثیر مصرف الکل قرار گرفته اید از صندلی استفاده نکنید.
- برای جلوگیری از صدمه و آسیب دستگاه دست یا انگشت خود را در محفظه های باز دستگاه فرو نکنید.
- اگر در زمان استفاده دود یا بوی غیر معمول مشاهده کردید فوراً از استفاده دست بکشید و سیم را جدا کنید.



اخطار

- برای جلوگیری از خرابی، خودتان قطعات آن را جدا نکنید.
- بدون مجوز و مهارت سعی در تعمیر دستگاه نکنید.
- لطفاً با نمایندگی مجاز یا نماینده خدمات تماس بگیرید.

برای افراد زیر مناسب نمی باشد:
 توصیه می کنیم افرادی که هر یک از شرایط زیر را دارند قبل از استفاده با پزشک خود مشورت کنند.

- کسانی که از ابزار پزشکی الکترونیکی در بدن مانند ضربان ساز قلب استفاده می کنند
- کسانی که تحت درمان هستند بویژه کسانی که احساس خوب و راحتی ندارند
- کسانی که تومورهای بدخیم یا آبسه های بدخیم دارند
- نیاز به بررسی و نظارت دارند
- زنانی که باردار هستند یا در دوران قاعدگی سپری می کنند
- افراد مبتلا به پوکی استخوان شکستگی ستون فقرات
- کسانی که بیماری پوستی دارند یا افرادی که پوستشان آسیب دیده است
- کسانی که تب بالا دارند
- این دستگاه سطح گرمی دارد. کسانی که به گرما حساسیت دارند باید در زمان استفاده از دستگاه مراقب باشند
- این دستگاه نباید توسط افرادی که باناتوانی جسمی و روحی بدون تجربه استفاده شود
- این دستگاه برای بچه های بالای 8 سال و یا بیشتر و یا
- افرادی باناتوانی روحی، جسمی و یا معلولیت ذهنی باید تحت نظر افراد معتبر استفاده شود

ملاحظات امنیتی:

قبل از استفاده همه هشدارها را به قوت مطالعه کنید
 اقدامات امنیتی و هشدارهای ذکر شده در زیر به استفاده صحیح از این دستگاه کمک خواهد کرد
 طبقه بندی حوادث ناشی از استفاده نادرست به دو دسته هشدار و احتیاط طبقه بندی می شود.





هشدار: عملکرد نادرست ممکن است باعث آسیب دیدگی کار بر شود 

احتیاط: عملکرد نادرست ممکن است باعث آسیب کاربر یا صدمه به محصول شود 

ممنوع  **جدانکردنی** 



جعبه برق

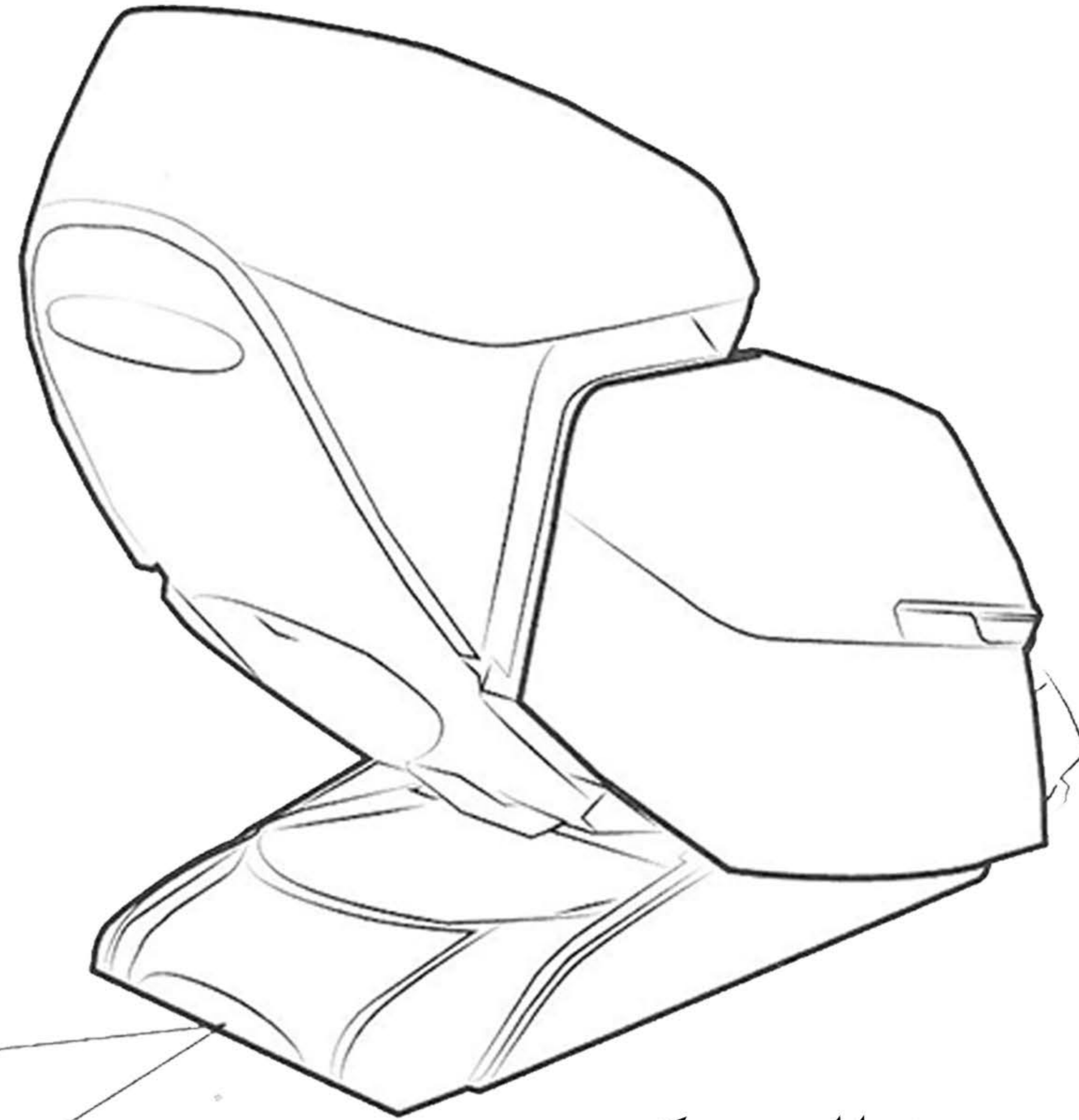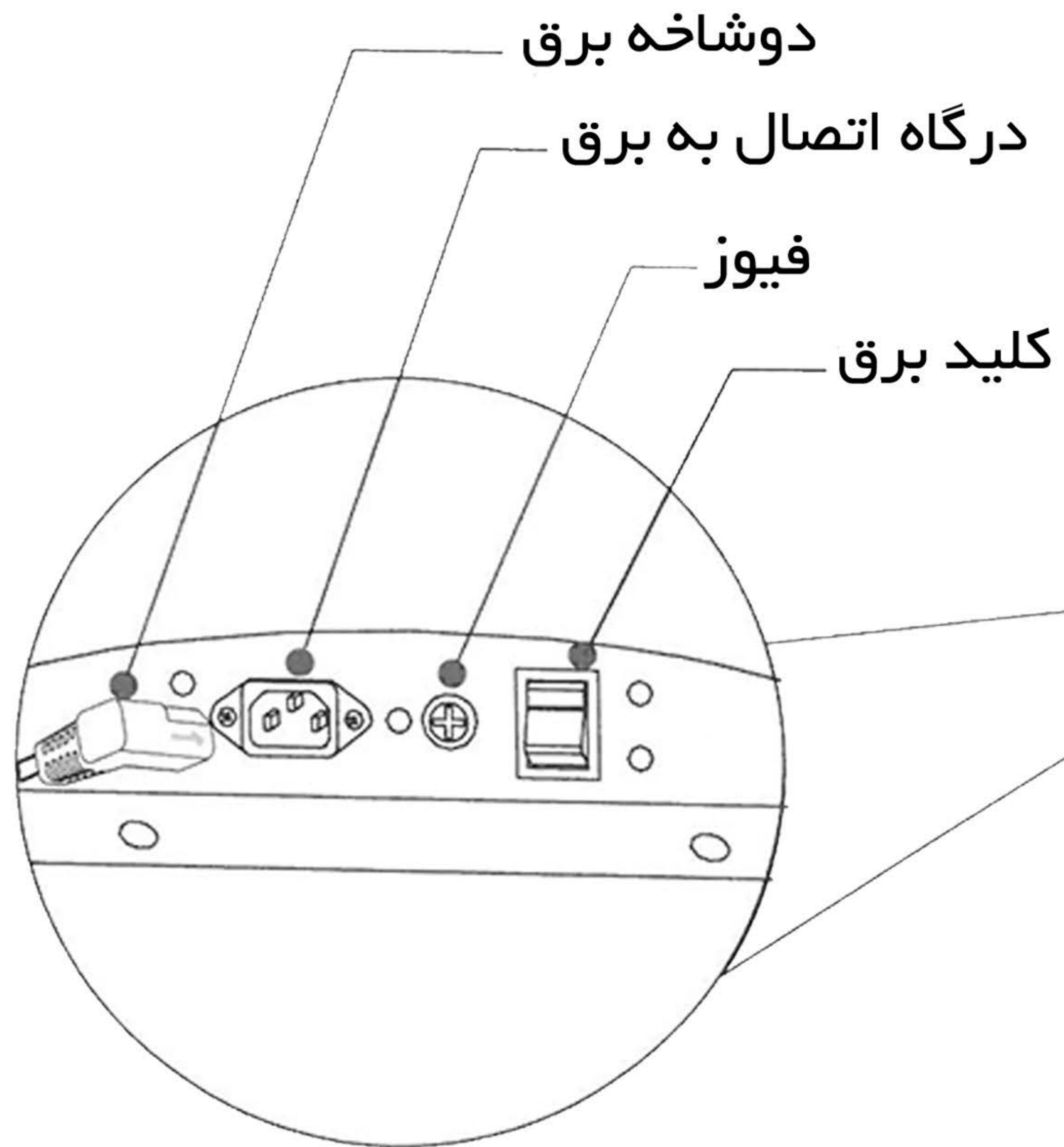

احتیاط:

- بچه ها باید تحت نظر باشند تا با صندلی بازی نکنند یا جعبه برق را لمس نکنند
- همیشه صندلی ماساژ را بعد از استفاده از پریز جدا کنید
- هنگام رعد و برق و طوفان سیم را از پریز جدا کنید
- برای اینکه بچه ها صندلی ماساژ را روشن نکنند صندلی را خاموش کرده و از پریز جدا کنید
- هنگامی که از صندلی استفاده نمیکنید توصیه میکنیم از کاور صندلی استفاده کنید سیم را جمع کنید و در یک محیط بدون گرد و غبار و رطوبت نگهداری کنید.

نام و عملکرد اجزاء

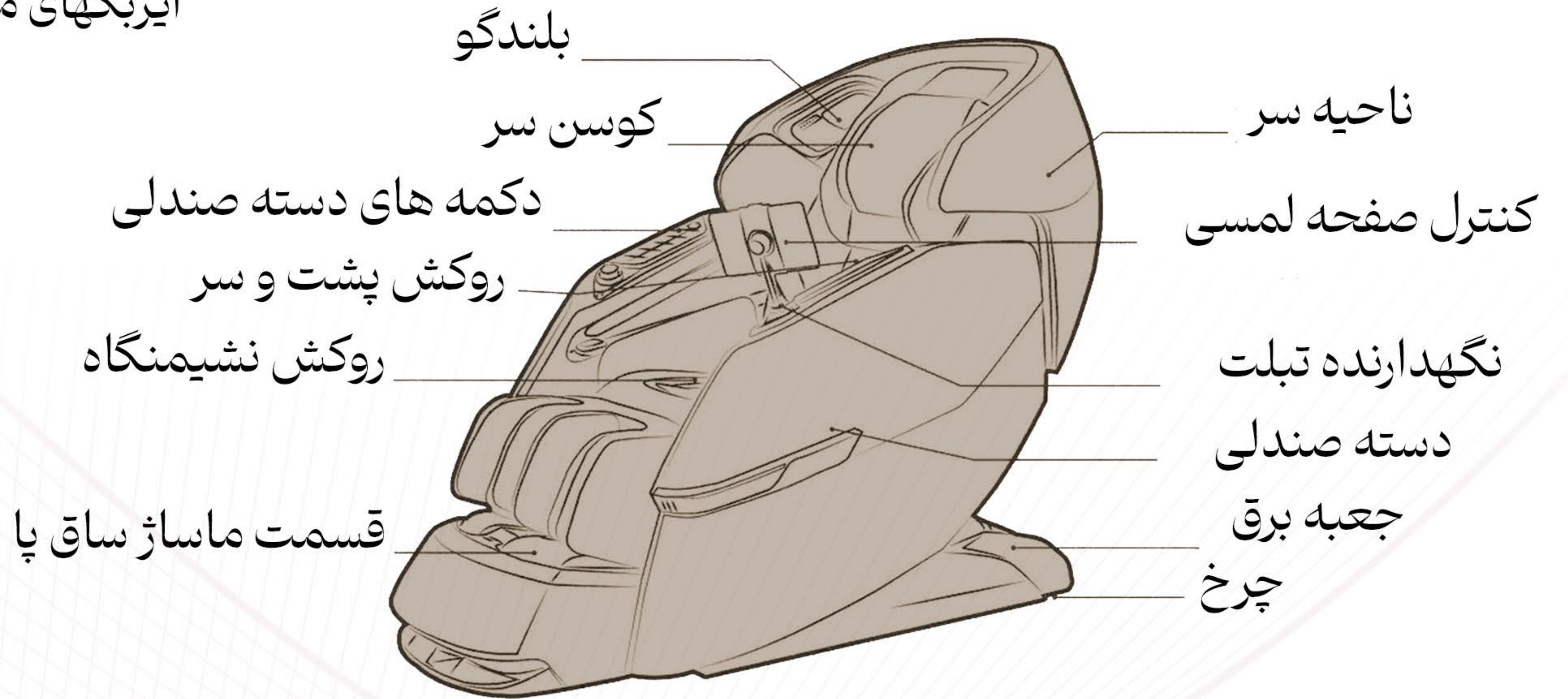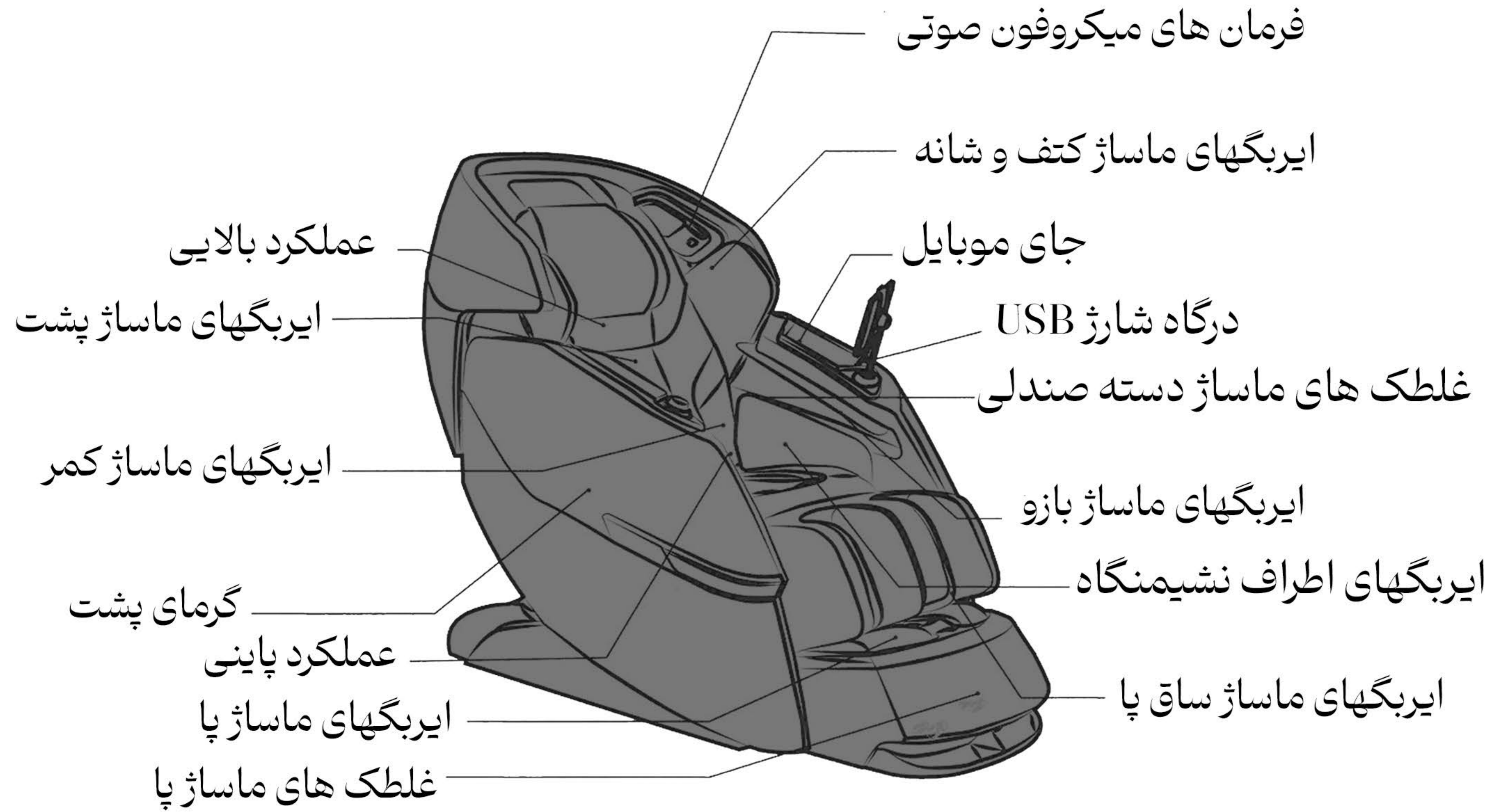

دستورالعمل های دستگاه

دکمه خاموش روشن / ماساژ



نشانگر در حالت آماده باش زرد می شود و با روشن شدن دستگاه به رنگ سفید در می آید. دکمه خاموش / روشن را فشار دهید و نگه دارید و برای حرکت بین برنامه های خودکار ماساژ سریع فشار دهید.

دکمه بین وزنی




برای قرار دادن صندلی در وضعیت بی وزنی این دکمه را فشار دهید. زمانیکه وضعیت بی وزنی 1 انتخاب شود نشانگر به رنگ سبز و زمانیکه وضعیت بی وزنی 2 انتخاب شود نشانگر آبی می شود.

دکمه گرما



این دکمه برای روشن شدن گرما در سطح 1 فشار دهید. نمایشگر به رنگ سبز در می آید برای تغییر به سطح 2 مجدد دکمه را فشار دهید. نمایشگر رنگ زرد را نمایان می کند و برای رفتن به سطح 3 گرما دکمه را برای بار سوم فشار دهید. نمایشگر به رنگ قرمز در می آید و برای خاموش شدن گرما برای بار چهارم دکمه را فشار دهید. نمایشگر رنگ سفید را نمایش خواهد داد.

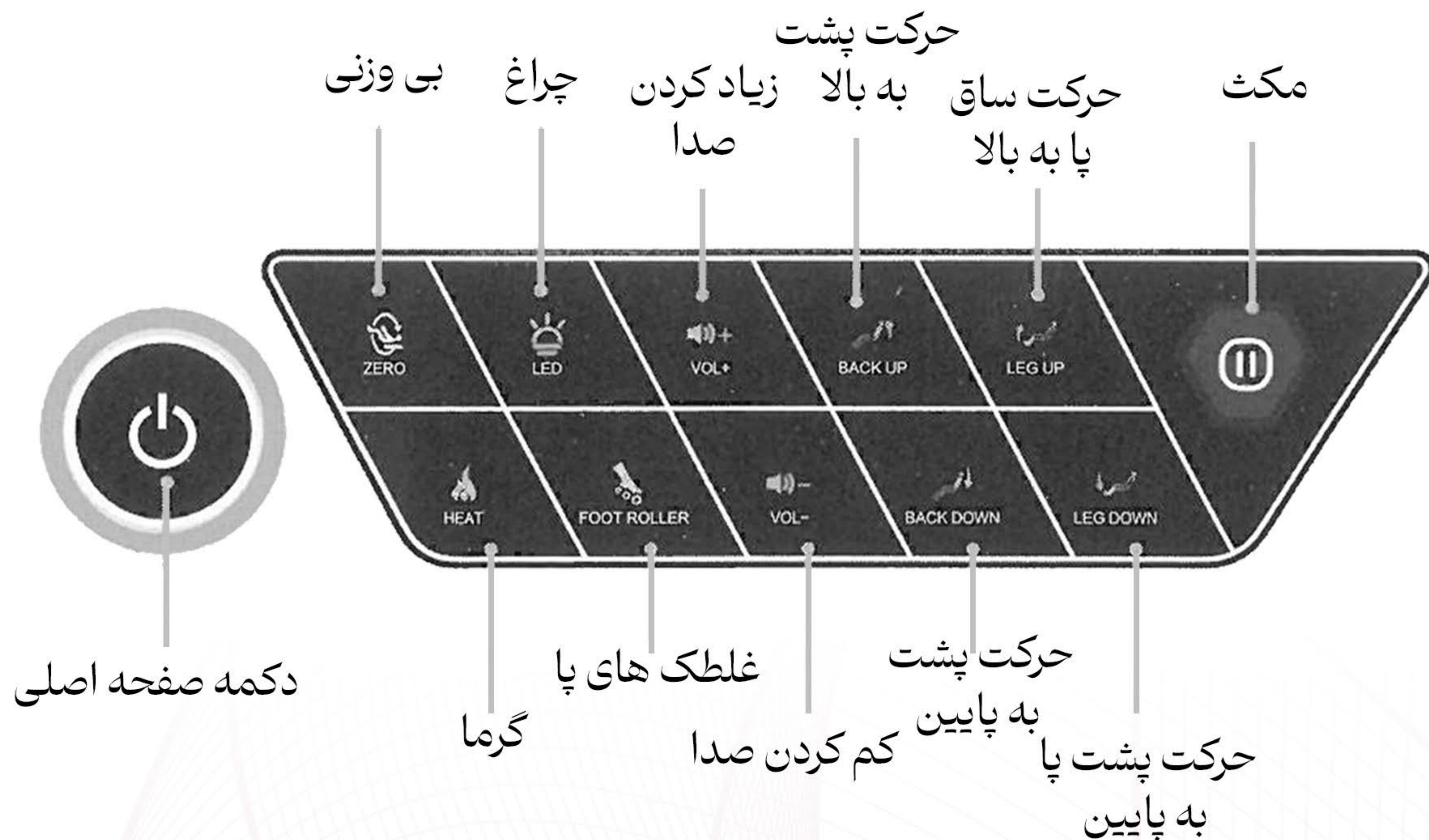

دستورالعمل های دستگاه

☀️ دکمه چراغ ها

این دکمه را برای روشن شدن چراغ های محیط فشار دهید، زمانیکه چراغ های بلندگو، دسته صندلی و قسمت پایی روشن می شود نمایشگر رنگ آبی را نمایش می دهد و زمانیکه این چراغ ها خاموش می شود دکمه نمایشگر سفید می شود.

👉 دکمه غلطک کف پا

برای حرکت میان برنامه سرعت غلطک پا، سطح یک، سطح دو و سطح سه این دکمه را فشار دهید زمانیکه غلطک ها کار می کند نمایشگر آبی و زمانیکه غلطک ها خاموش می شود نمایشگر رنگ سفید را نمایش می دهد

🔊+ زیاد کردن صدا

زمانیکه این دکمه را برای زیاد کردن صدا فشار می دهید نمایشگر رنگ سفید را نشان می دهد و زمانیکه به حداکثر صدا برسد رنگ نمایشگر آبی می شود.

🔊- کم کردن صدا

زمانیکه این دکمه را برای کم کردن صدا فشار می دهید نمایشگر به رنگ سفید درمی آید و زمانیکه صدا به حداقل می رسد رنگ نمایشگر آبی می شود

⬆️ حرکت پشت به بالا

این دکمه را برای حرکت قسمت پشتی به سمت بالا فشار دهید و نگه دارید (چراغ نمایشگر آبی چشمک میزند و زمانیکه تا حد مشخص شده بالا آمد چراغ نمایشگر یکنواخت آبی میشود) برای توقف دکمه را رها کنید (نمایشگر سفید میشود)

⬇️ حرکت پشت به پایین

این دکمه را برای حرکت قسمت پشتی به سمت پایین فشار دهید و نگه دارید (نمایشگر آبی چشمک میزند) و زمانیکه تا حد مشخص شده پایین آمد (نمایشگر یکنواخت آبی می شود) برای توقف دکمه را رها کنید (نمایشگر سفید میشود)

دستورالعمل های دستگاه

حرکت ساق پا به بالا نمر ۲

این دکمه را برای حرکت ساق پا به بالا فشار دهید و نگه دارید (نمایشگر آبی چشمک می زند) و زمانیکه تا حد مشخص شده بالا آمد (چراغ نمایشگر یکنواخت آبی می شود) برای توقف دکمه را رها کنید (نمایشگر سفید میشود)

حرکت ساق به پایین نمر ۳

این دکمه را برای حرکت ساق پا به سمت پایین فشار دهید و نگه دارید (نمایشگر آبی چشمک می زند) و زمانیکه تا حد مشخص شده پایین آمد (چراغ نمایشگر یکنواخت آبی می شود) برای توقف دکمه را رها کنید (نمایشگر سفید می شود)

مکث نمر ۴

این دکمه را برای مکث و از سرگیری عملکرد صندلی ماساژ فشار دهید.



عملکرد و امکانات

1- دکمه حرکت به جلو

این قابلیت باعث میشه صندلی 28 سانتی متر به جلو بلغزد و بعد از آن خم می شود. این عملکرد باعث صرفه جویی در فضا و ایجاد یک موقعیت آرامبخش می شود.

2- بی وزنی

در چنین موقعیت بی وزنی که بلندی ساق پا اندکی بیشتر از بالاتنه باشد وزن بدن بطور یکنواخت پخش می شود و فشار به روی ستون فقرات و مفاصل از نظر جسمی و روحی کم خواهد شد.

3- گسترش کف پا بطور خودکار / دستی \ ناحیه پا می تواند بطور خودکار بر حسب طول پای کاربر گسترش یابد. همچنین شما می توانید دکمه دستگاه کنترل را برای تنظیم ناحیه پا با توجه به نیاز خود تنظیم کنید. ناحیه پا می تواند بطور خودکار تا 15 سانتی متر برای کاربران مختلف بر حسب اندازه پا گسترش یابد.

4- ماساژ فشار هوا

ماساژ فشار هوای کل بدن برای شانه، بازو، کمر، ران، ساق پا و کف پا مورد استفاده قرار میگیرد

5- ماساژ غلطکی

سه ردیف غلطک سازی شده به ماساژ دست و شیاستو برای ناحیه رفلکس ارائه می شود

6- تکنیکهای ماساژ همه کاره

تقلید از ورزش دادن با دست انسان، ضربه ای، ضربات متوالی، شیاستو، همسان سازی و شیاستو چهار بعدی برای ایجاد آرامش

7- کنترل صوتی آفلاین

سیستم کنترل صوتی هوشمند نیازهای کنترل آسانتر را فراهم می کند

8- ماساژ دو هسته ای

مکانیزم 4 بعدی ماساژ بافت عمیق، مکانیزم تخصصی کمر و باسن همراه با سیستم اسکن بدن برای ارائه ماساژ چند زاویه ای و مناسب برای کاربران

9- مسیر راهنمای انعطاف پذیر خلاقانه

مسافت طی کردن مکانیزم از 1160 میلی متر به 1210 افزایش یافته است. انجام ماساژ سه بعدی در امتداد گردن، شانه ستون فقرات و تا پایین باسن و ران

فرمان صوتی

پاسخ صندلی ماساژور

Voice Command	Chair Reply
Switch to voice mode	Hello
Power off	OK, turn off massage chair
Yoga Stretch	OK, Yoga Stretch
Deep Shiatsu	OK, Deep Shiatsu
Tranquil Massage	OK, Tranquil Massage
Relax Massage	OK, Relax Massage
Gentle Massage	OK, Gentle Massage
Soothing Massage	OK, Soothing Massage
Neck & Shoulder	OK, Neck & Shoulder
Waist & Buttocks	OK, Waist & Buttocks
Back & Spine	OK, Back & Spine
Thai Massage	OK, Thai Massage
Traditional Massage	OK, Traditional Massage
Gentle Press Massage	OK, Gentle Press Massage
Foot Roller On	OK, Foot Roller On
Stop Foot Roller	OK, Stop Foot Roller
Start Heating	OK, Start Heating
Heating -Off	OK, Heating -Off
Recline Position Off	OK, Recline Position Off
Recline Position One	OK, Recline Position One
Recline Position Two	OK, Recline Position Two

به حالت صدا تغییر دهید

خاموش کن

کششی یوگا

شیاتسو عمیق

ماساژ آرام

ماساژ ریلکسی

ماساژ ملایم

ماساژ تسکین دهنده

گردن و شانه

کمر و باسن

پشت و ستون فقرات

ماساژ تایلندی

ماساژ سنتی

ماساژ با فشار ملایم

غلطک کف پا شروع به کار میکند

غلطک کف پا متوقف می شود

گرما روشن بشه ؟

گرما خاموش شود؟

حالت دراز کش خاموش شود

حالت دراز کشیدن ۱

حالت دراز کشیدن ۲

سلام

صندلی ماساژور خاموش شود

کششی یوگا

شیاتسو عمیق

ماساژ آرام

ماساژ ریلکسی

ماساژ ملایم

ماساژ تسکین دهنده

گردن و شانه

کمر و باسن

پشت و ستون فقرات

ماساژ تایلندی

ماساژ سنتی

ماساژ با فشار ملایم

غلطک کف پا شروع به کار میکند

غلطک کف پا متوقف می شود

گرما روشن بشه ؟

گرما خاموش شود؟

حالت دراز کش خاموش شود

حالت دراز کشیدن ۱

حالت دراز کشیدن ۲

کنترل صوتی آفلاین

دستگاه صوتی را می توان با لمس شیار مربعی شکل توسط میکروفون فرمان صوتی در دسته چپ یا گفتن تغییر به حالت صوتی فعال کرد.



بررسی های مقدماتی

موقعیت و محل نصب:

فاصله مجاز برای صندلی ماساژ: اطمینان حاصل کنید که فاصله کافی برای نصب وجود دارد، برای خم شدن پشتی به سمت عقب نیاز به فاصله 10 سانتی متری دارد و برای بلند شدن و گسترش قسمت پایینی نیاز به فاصله 60 سانتی متری دارد برای جلوگیری از تداخل سیگنال آن را به فاصله یک متر از تلویزیون، رادیو و یا سایر وسایل صوتی تصویری دورنگه دارید بین پریز برق و کلید خاموش روشن حدوداً 1.5 متر فاصله را رعایت کنید.

احتیاط:

زمانیکه صندلی ماساژ کشویی به سمت جلو حرکت می کند برای جلوگیری از آسیب سیم برق بین پریز برق و کلید خاموش / روشن حدوداً 1/5 متر فاصله را رعایت کنید

هنگام استفاده از سیم برق آن را صاف کنید تا از گره خوردن یا آسیب دیدن جلوگیری شود زمانیکه صندلی ماساژ به سمت عقب یا جلو کشویی حرکت می کند اطمینان حاصل کنید که در اطراف صندلی بچه یا حیوان خانگی یا سایر اشیاء وجود نداشته باشد.




روش های نصب

قدم اول : همه قسمت های صندلی ماساژ را از کارتن خارج کنید

- کارتن ها را باز کنید، کلیه قطعات و لوازم داخلی را از کارتن خارج کنید
- قبل از شروع نصب لطفا چک کنید که همه قسمت ها و اجزاء در آن گنجانده شده باشد (بالیست بسته بندی چک کنید)

قدم دوم: نصب دسته صندلی

شلینگ های هوای دسته صندلی را به نازل های مربوط وصل کنید (همین کار را برای دسته دیگر انجام دهید)


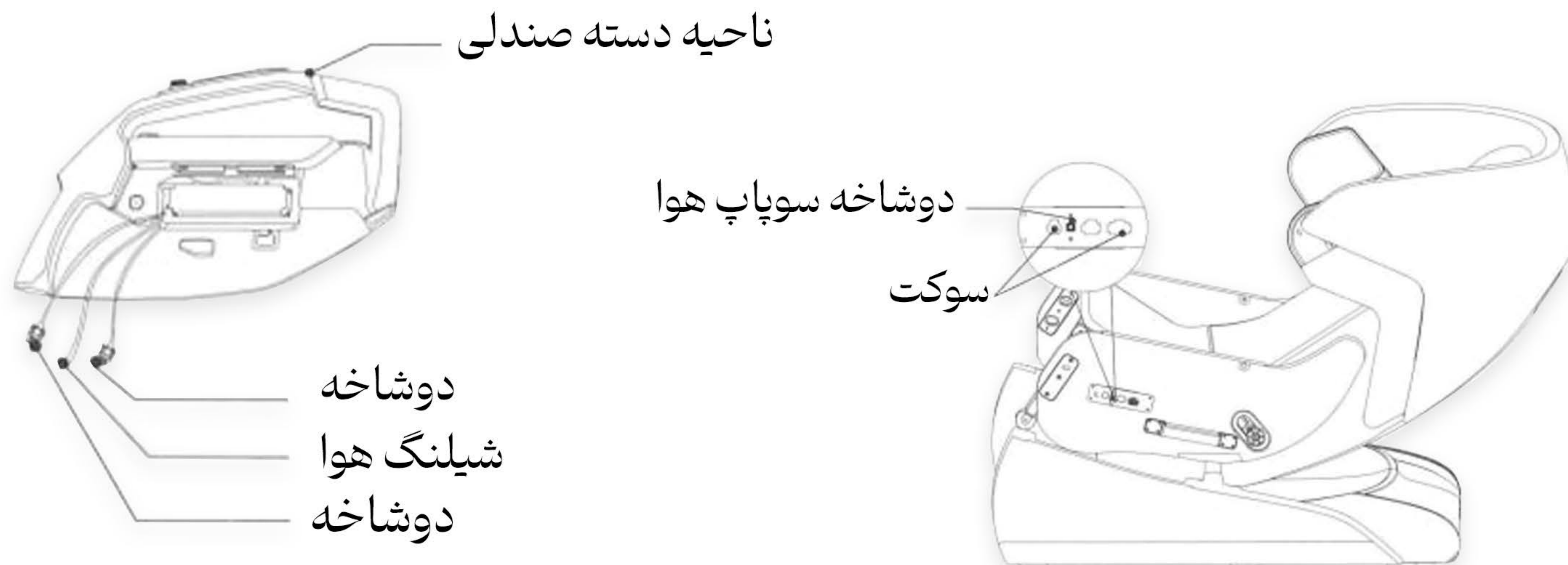


روش های نصب


قسمت دسته صندلی را بالا نگه دارید و قلاب 2 را به شیار حامل وصل کنید به آرامی قسمت دسته را به داخل صندلی متصل کنید تا قلاب 2 کاملاً با قلاب 4 هم تراز شود قلاب 1 را در قلاب 3 قرار دهید، از یک پیچ برای محکم کردن دسته در محل خود استفاده کنید (همین روش نصب را برای طرف دیگر صندلی انجام دهید).

قدم سوم: نصب نگهدارنده دستگاه کنترل صفحه لمسی


انتهای پایینی نگهدارنده کنترل تبلت را در سوکت قرار دهید مهره را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا نگهدارنده در جای خود محکم شود.

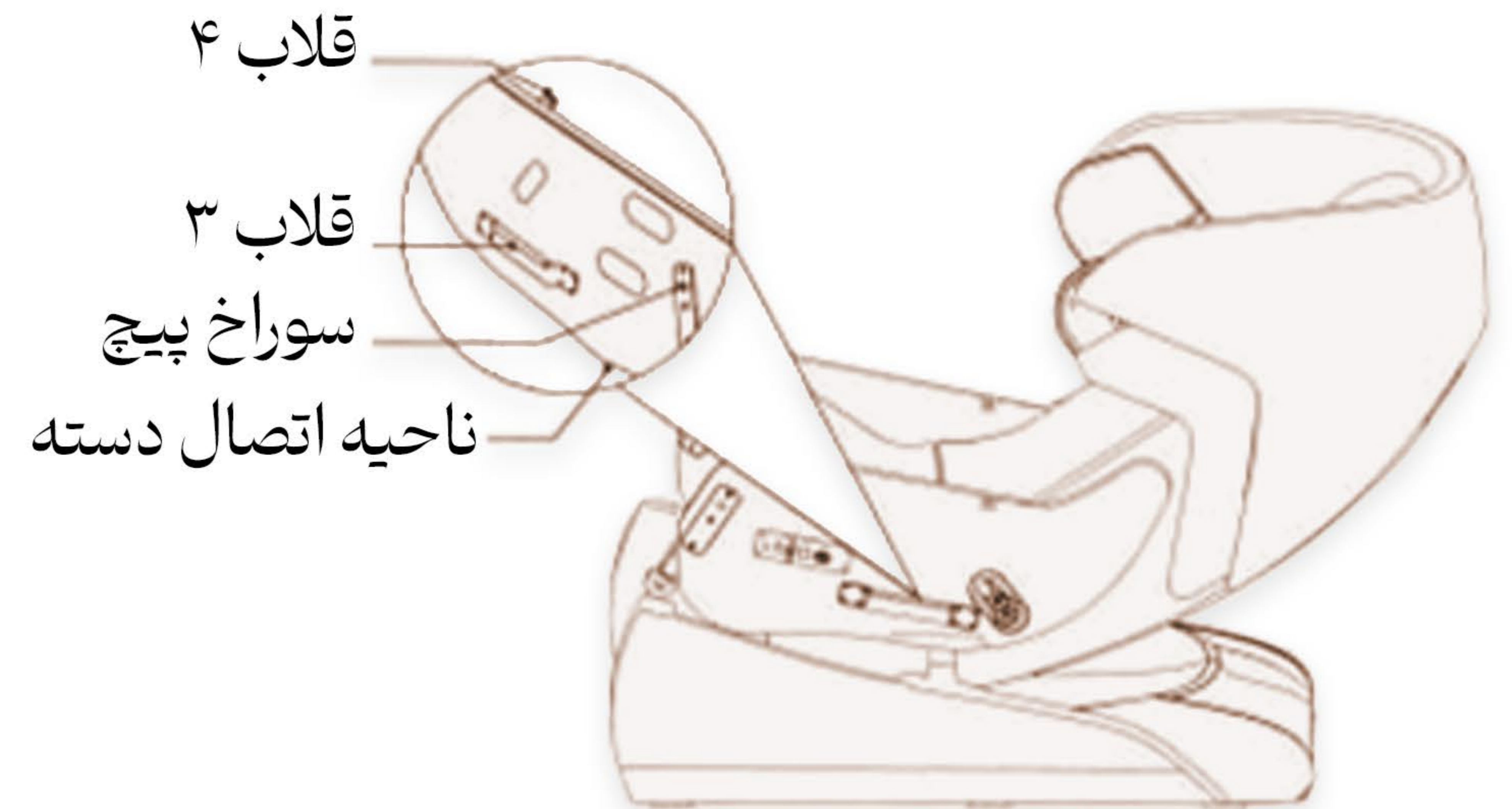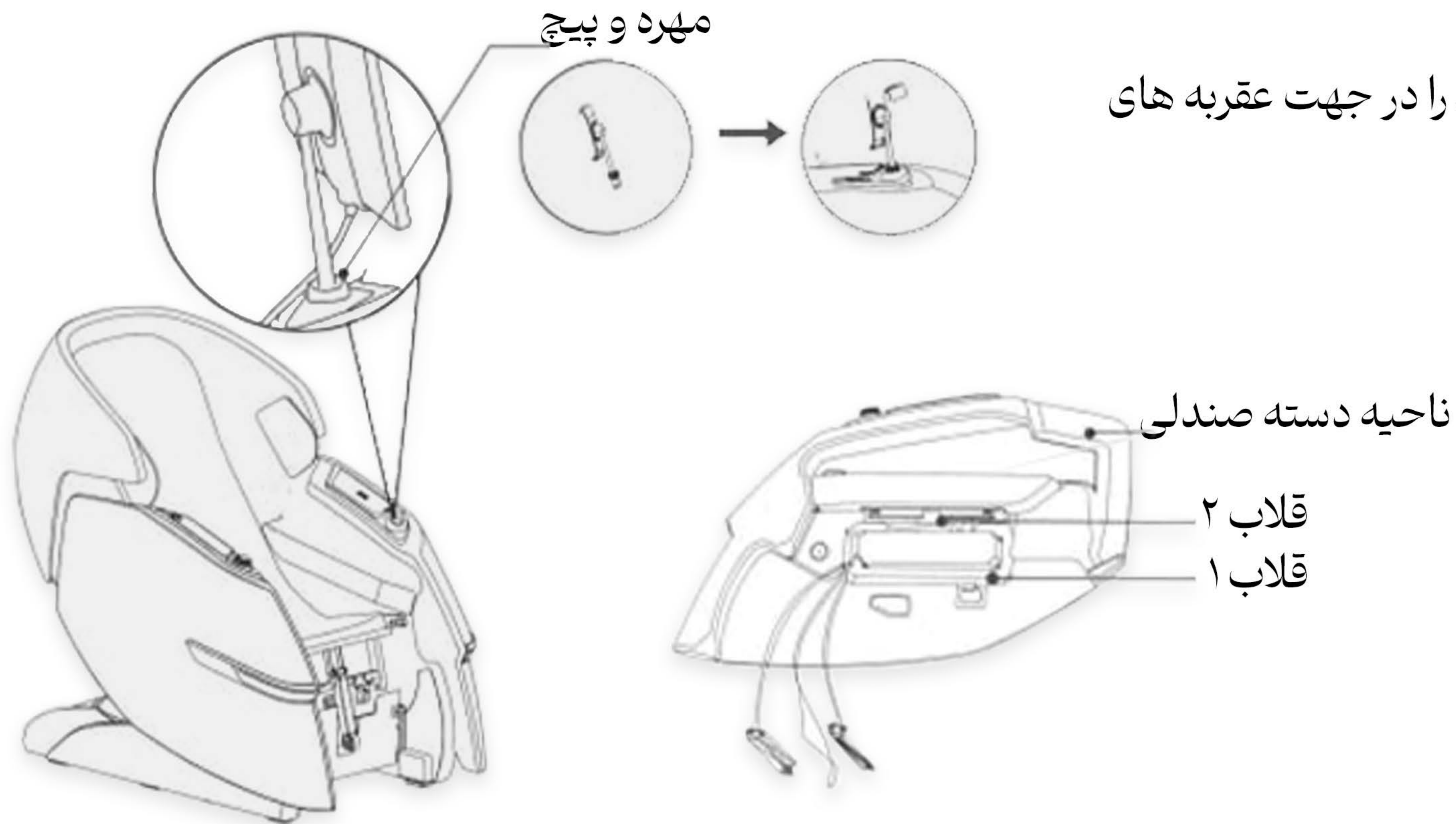

روش های نصب

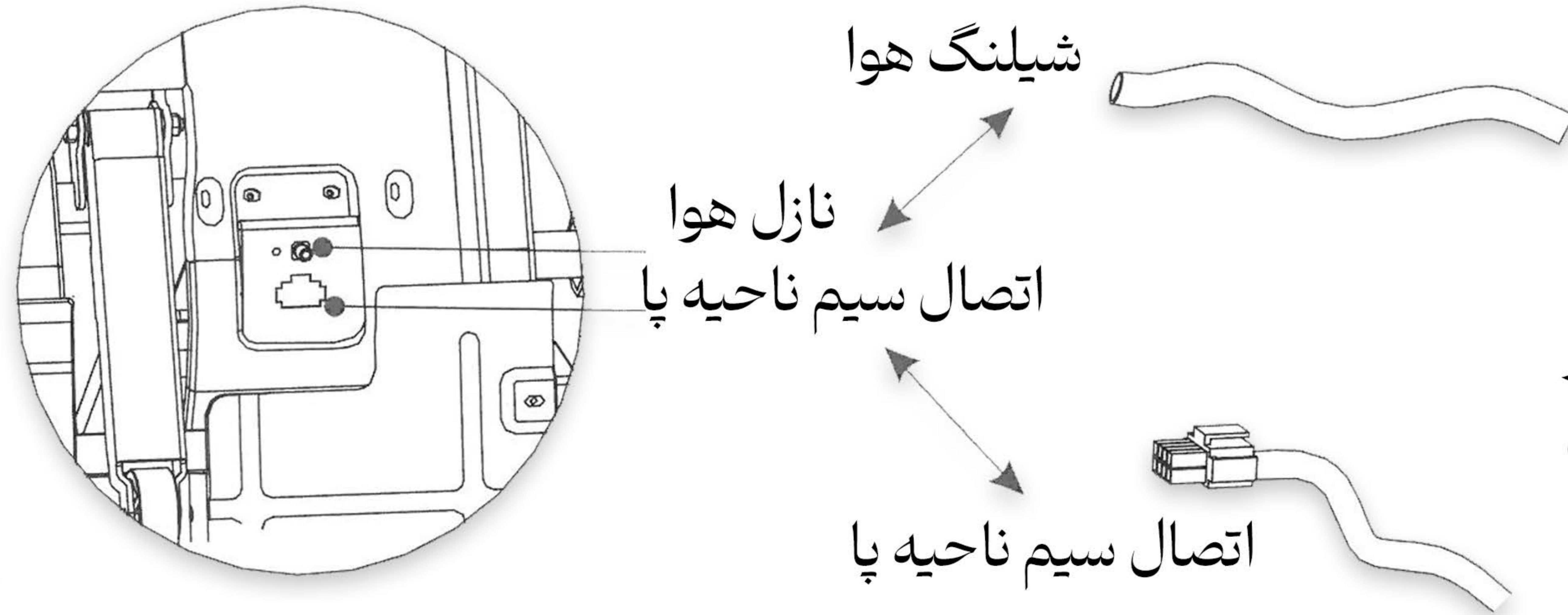

قدم چهارم: نصب نگه دارنده و نگاه کنترل صفحه لمسی کابل دستگاه کنترل را به درگاه صندلی ماساژ وصل کنید (قبل از نصب گیره ها را با درگاه تنظیم کنید) سپس درپوش پیچ را در جهت عقربه های ساعت پیچانید تا اتصال در محل خود محکم شود

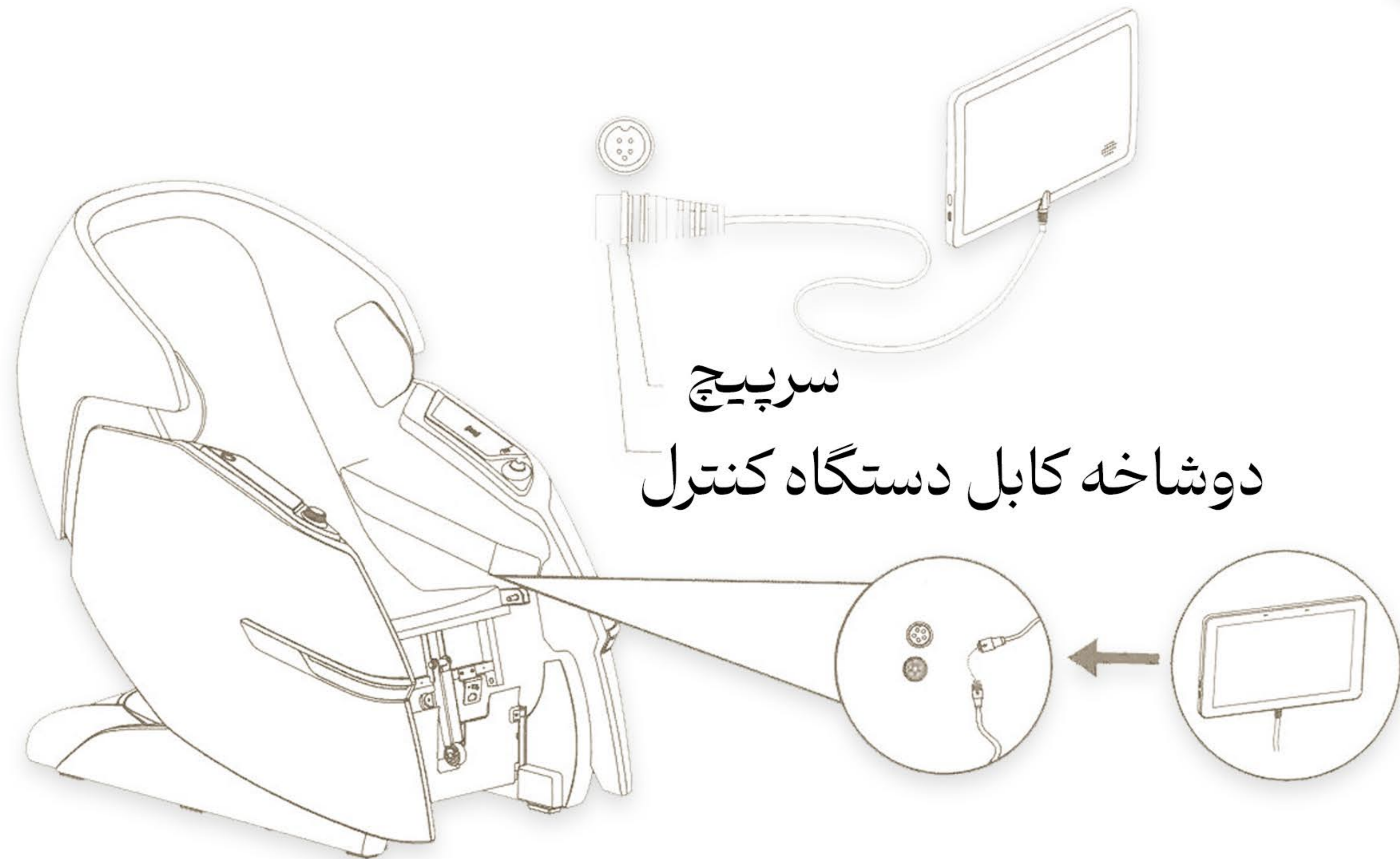



قدم پنجم: نصب قسمت کف پا قسمت ساق پا را بلند کنید. شیلنگ هوا را نازل هوا کنید و دو شاخه دریچه هوا را در دریچه هوا که در سمت جلوی پایه صندلی قرار دارد، بگذارید و مطمئن شوید که بخوبی محکم شده باشد

- روکش قلاب ساق پا را داخل قلاب ساق پا قرار دهید قلاب ساق پا را روی محور چرخش ساق پا وصل کنید سپس یک گره DK به انتهای میل چرخشی پایه ساق پا وصل کنید تا قسمت پایی محکم شود سپس قسمت کف پا و بدنه صندلی را بهم متصل کنید.

روش های نصب

قدم ششم : لوازم جانبی دیگر

کابل برق را به پریز برق محصول که قسمت پایین دسته راست قرار دارد وصل کنید، صندلی را به برق وصل کنید دکمه روشن خاموش را فشار دهید تا روشن شود از روی دستگاه کنترل برای بالا آوردن پشتی صندلی به حالت عمودی استفاده کنید.

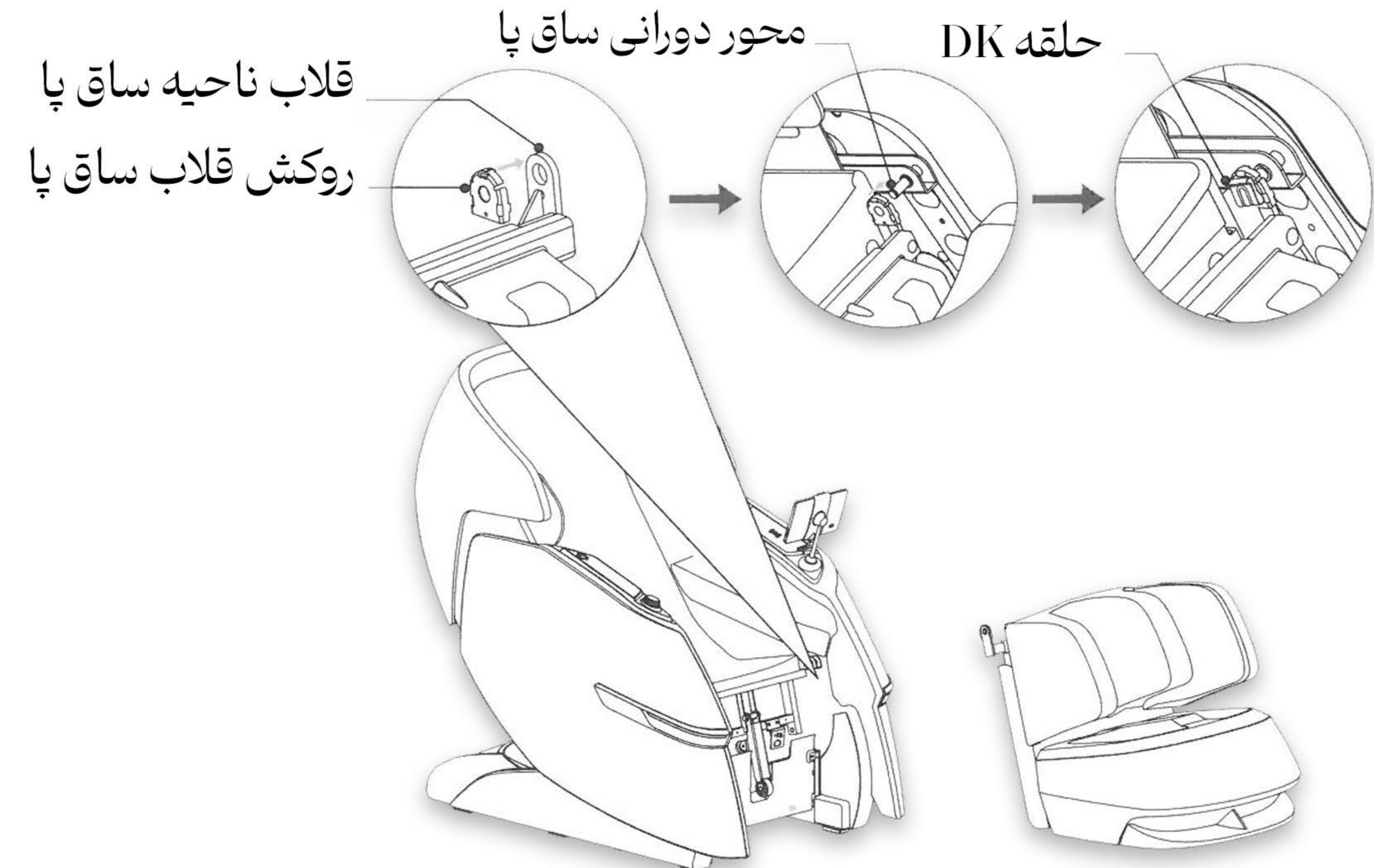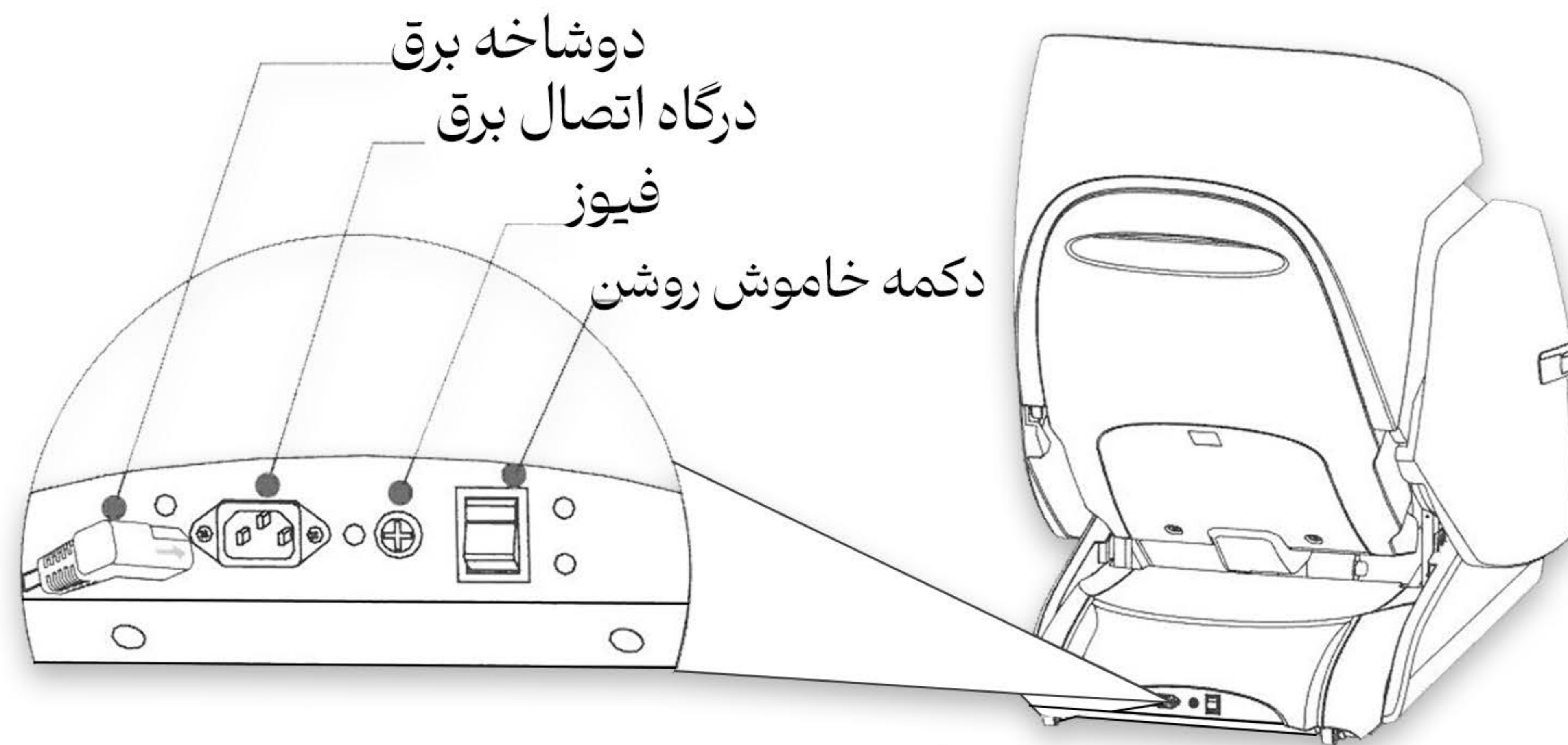

روش های نصب


حرکت دادن صندلی ماساژ:

صندلی را به روی چرخ کوچک زیر صندلی حرکت داده و به ست محل مورد نظر بچرخانید پشتی صندلی را به حالت عمودی متمایل کنید کلید برق صندلی را خاموش کرده و دستگاه را از پریز برق جدا کنید با استفاده از دو نفر پشتی صندلی را سمت پایین فشار دهید، با گرفتن نگهدارنده متحرک که در قسمت جلویی دسته قرار دارد صندلی را بلند کنید صندلی را به روی چرخ کوچک زیر صندلی به سمت محل مورد نظر بچرخانید (برای اطلاعات بیشتر عکس زیر را بررسی کنید)



اتصال به برق:

این دستگاه را به یک خروجی 3 سیم که به درستی نصب شده است وصل کنید کلید برق اصلی را از سمت راست صندلی ماساژ روشن کنید.

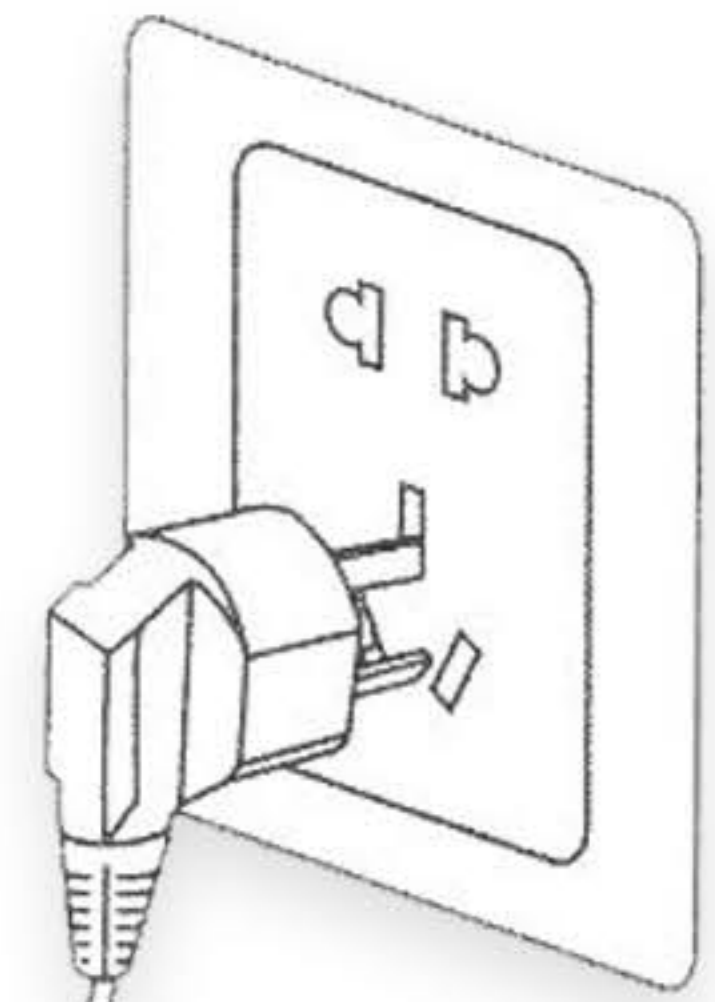

احتیاط:

قبل از اینکه صندلی ماساژ را روشن کنید بررسی کنید که سیم تامین کننده برق آسیب ندیده باشد قبل از اتصال به برق بررسی کنید که کلید خاموش / روشن اصلی خاموش باشد

احتیاط:

زمانیکه کاربر در حال استفاده از صندلی می باشد صندلی را حرکت ندهید. برای حمل این محصول، از ناحیه کف پا یا دسته بلند نکنید شاسی را نگه دارید و پشتی را ثابت نگه دارید (برای حمل از ۴ نفر یا بیشتر استفاده کنید)

راه اندازی

قبل از نشستن روی صندلی :

قبل از اینکه روی صندلی ماساژ بنشینند اطمینان حاصل کنید که قسمت پایی و کف پا بخوبی نصب شده باشد. مطمئن شوید صندلی ماساژ به حالت اصلی برگشته باشد قبل از آنکه روی آن قرار بگیرید اگر هر قسمتی از صندلی در وضعیت اولیه نبود لطفا صندلی را خاموش کرده و اجازه دهید به حالت اولیه بازگردد.

احتیاط :

اگر قسمت ساق پا بالا بود لطفا از نشستن روی صندلی خودداری کنید برای جلوگیری از آسیب ، بکیاره سنگینی زیادی روی ناحیه ساق پا وارد نکنید

با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور پشتی صندلی را در پائین ترین حالت قرار دهید قسمت پایی را بالا آورده و گسترش دهید. قبل از راه اندازی اطمینان حاصل کنید که فضای مجاز کافی وجود داشته باشد.

بعد از راه اندازی، پشتی صندلی و قسمت پایی را به حالت اولیه برگردانید و دستگاه را خاموش کنید (برای انتخاب برنامه ماساژ دستورالعمل های دکمه های دستگاه کنترل را مطالعه کنید)



گسترش کف پا:

با استفاده از دکمه بازشدن / جمع شدن روی دستگاه کنترل می توانید برای تجربه بهتر ماساژ ناحیه کف پا را به میزان دلخواه خود باز یا بسته کنید (اطمینان حاصل کنید که فضای کافی موجود باشد)، دکمه را برای ثابت شدن موفقیت رها کنید. سنسور ناحیه کف پا در قسمت زیر کف پا قرار گرفته است. زمانی که صندلی شروع به کار می کند ناحیه کف پا بطور خودکار طول را تنظیم می کنند.

هشدار:

روی صندلی ماساژ بازی نکنید یا از آن استفاده نادرست نکنید. اطمینان حاصل کنید که هنگام بالا بردن یا خم شدن قسمت پایی و پشتی هیچ مانعی وجود نداشته باشد. زمانی که صندلی به حالت خم به عقب پشتی یا بلند شدن می باشد، پا، انگشت و یا هر اشیاء دیگری را در فاصله بین نشیمنگاه و قسمت پشتی و پایی قرار ندهید اطمینان حاصل کنید قبل از اینکه صندلی خاموش شود به حالت اولیه برگشته باشد.

بعد از استفاده:

همیشه بعد از استفاده صندلی ماساژ را فوراً از پریز برق جدا کنید در حالیکه از صندلی استفاده نمی کنید صندلی را خاموش کرده و از پریز برق جدا کنید تا کودکان بطور تصادفی صندلی را روشن نکنند. هنگامی که مدت طولانی از صندلی استفاده نمیکنید توصیه میکنیم صندلی را بپوشانید سیم برق را جمع کرده و در محیطی عاری از گرد و غبار و رطوبت قرار دهید.



هشدار:

بچه ها با این دستگاه نباید بازی کنند تمیز کردن یا نگهداری نباید توسط بچه ها بدون نظارت انجام شودسیم برق را قبل از مراقبت و نگهداری از پریز برق جدا کنید. به منظوره جلوگیری از برق گرفتگی یا صدمه سیم برق را بادست خیس لمس نکنید. اطمینان حاصل کنید که در زمان تمیز کردن هیچ محلولی وارد جعبه برق نشده باشد. از بنزن، تینر یا سایر حلال ها روی محصول استفاده نکنید چون باعث کم رنگ شدن محصول و یا صدمه به آن می شود. روکش های صوتی را اتونکنید.

روش های نگهداری:

اگر به مدت طولانی از دستگاه استفاده نمیکنید محصول را از گرد و غبار پاک کنید و محصول را با یک پارچه بدون گرد و غبار بپوشانید.

دستورالعمل های مراقبت

برای از بین بردن کدهای پنل پشتی، دسته قسمت پایی قطعات پلاستیکی یا شیلنگ محل را با فوم شوینده ملایم تمیز کرده سپس با یک پارچه تمیز و خشک پاک کنید

برای از بین بردن لکه های روی دستگاه کنترل و جعه برق، محل را با یک پارچه تمیز و خشک پاک کنید

- برای از بین بردن لکه های کوسن پشتی یا متکا فقط از پاک کننده های برپایه آب مخصوص روکش استفاده کنید و با یک دستمال مرطوب پاک کنید و در مجاورت هوا خشک کنید

برای تمیز کردن روکش های قسمت پا و ساق پا آن را از صندلی جدا کنید و با دستمال و یک محلول شوینده ملایم بشوید سپس صاف پهن کنید تا خشک شود.

احتیاط:

- لطفا در صورت مشاهده علائم بالا از استفاده محصول خودداری کنید تا از خرابی محصول یا ایجاد حادثه جلوگیری شود.

دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز جدا کنید برای تعمیر با توزیع کنندگان محلی یا تأمین کنند تماس بگیرید. تمامی سرویس دهی ها بجز موارد مراقبت و نگهداری فوق باید توسط نمایندگی مجاز یا مرکز خدمات انجام شود.

هشدار:

قبل از مراقبت و نگهداری برق را از پریز جدا کنید، به منظور جلوگیری از برق گرفتگی یا صدمه سیم برق را با دست خیس لمس نکنید. سعی در جداسازی قطعات یا تعمیر محصول نداشته باشید لطفا صندلی ماساژ را به مرکز خدمات مجاز ارسال کنید.

احتیاط:

محصول را به مدت طولانی در معرض مسقیم نور خورشید قرار ندهید باعث کمرنگ شدن رنگ محصول و یا صدمه به آن می شود.

نکات حائز اهمیت:

در طول استفاده روزانه ، لطفا علائم زیر را چک کنید:
 بوی سوختگی: هنگام لمس سیم برق ، محصول روشن خاموش شدن غیر معمول را تجربه می کند. سیم برق داغ و سایر علائم غیر معمول ...



عیب یابی

اگر مشکلی باقی ماند لطفاً برای تعمیر و نگه داری با نمایندگی تماس بگیرید
نکته مهم:

سعی نکنید خودتان محصول را تعمیر کنید
شرکت ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدمه یا خسارت ناشی از هر گونه سرویس غیر مجاز نخواهد داشت.

مشخصات فنی

نام: صندلی ماساژ چند منظوره لوکس

مدل: R18901

ولتاژ مجاز: 220-240V


فرکانس مجاز: 50-60 هرتز

برق / توان مجاز: 210W

طراحی امینی: رده یک

ردیف	علائم	علل احتمالی	راه حل های احتمالی
1	حین استفاده صدا شنیده می شود	این صدا طبیعی است و از مالش ماساژور به روی پارچه ناشی می شود	نیاز به هیچ اقدامی نیست
۲	دستگاه شروع بکار نمی کند	سیم برق در سوکت محکم نشده است. دکمه خاموش روشن خاموش است. فیوز سوخته است	سیم برق را به درستی به سوکت وارد کنید دکمه را روشن کنید. یک فیوز از همان نوع فیوز جایگزین کنید
۳	بعد از اتصال بلوتوث موزیکی از بلندگو پخش نمی شود	صدادر کمترین حد قرار گرفته است بلوتوث خاموشه بلوتوث به دستگاه دیگه وصله	صدا را از موبایل خود تنظیم کنید بلوتوث را روشن کنید بلوتوث را مجدد وصل کنید
۴	تست پشتی یا پایی بالانمی رود یا به عقب متمایل نمی	فشار بیش از حد به پشتی یا قسمت پایی	بار را کاهش دهید و مجدد امتحان کنید
۵	حد عمل کردن کیسه های هوا	شیلنگ هوا مسدود شده است	شیلنگ هوا را صاف گذاشته و انسداد را بر طرف کنید



22755097-8 - 22749839-40 - 22749468 - 09124708193 

WWW.Nikanasa.Com 

@Arontbestrest 

آدرس: تهران میدان تجریش خ غلام جعفری مرکز خرید تندیس ط 6 شرقی واحد 607 